

# SPATOLA DI AYRE IN LEGNO

Spatola di ayre in legno, lungh. cm 18 ca, con estremità a spatola e a testa di femore.

Il dispositivo viene utilizzato per la raccolta escocervicale.



Il prodotto viene fornito sia sterile che non sterile:

**0136** : confezionata singolarmente in carta medica; fornita in conf. da 500 pz.

**0136/NS** : fornita in conf. multiple da 100 pz.

**0136**



**0136/NS**



## ••• SCHEDA TECNICA •••

### SPATOLA DI AYRE MONOUSO NON STERILE

**CODICE**  
0136/NS

**CODICE C.N.D.**  
U0899

**NUMERO DI REPERTORIO**  
12934/R

<b>MARCHIO COMMERCIALE</b>	HOSPITAL'S SPAT
<b>FABBRICANTE</b>	G.P.S. S.R.L. – Via Del Chioso n. 8 – 24030 Mozzo (BG) Tel. 035-4376456 Fax 035-617844 E-mail: <a href="mailto:gps@gpsmedical.com">gps@gpsmedical.com</a> website: <a href="http://www.gpsmedical.com">www.gpsmedical.com</a>
<b>CLASSE DI APPARTENENZA</b>	I NON STERILE
<b>NORME DI RIFERIMENTO</b>	prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE del 14.06.1993, ALLEGATO VII
<b>MARCHIO</b>	CE

#### INDICAZIONI D'USO

Il dispositivo è inteso per l'effettuazione di prelievi citologici del fornice vaginale e dell'esocervice.

#### CARATTERISTICHE

Spatola in legno, lunghezza cm. 18 circa, con estremità a spatola ed a testa di femore.  
Confezionata singolarmente in carta medica. I materiali impiegati nella costruzione del dispositivo e gli eventuali coloranti sono atossici.

**- LATEX FREE: il materiale di produzione e di confezionamento primario e secondario sono esenti da lattice**

#### CONFEZIONAMENTO

Il prodotto viene fornito in confezioni multiple non sterili da 250 pezzi.

#### CONSERVAZIONE/IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in luogo asciutto. Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

#### ELIMINAZIONE E SMALTIMENTO DOPO L'USO

Il prodotto è monouso e quindi non riusabile. Può venire scaricato oppure bruciato insieme ad altri rifiuti, osservando le disposizioni delle Autorità Locali. L'eliminazione per incenerimento non dà luogo a formazione di residui tossici.

#### ISTRUZIONI D'USO

Dilatate la cavità vaginale con l'utilizzo di uno speculum vaginale.  
Inserire il dispositivo e prelevare il campione del fornice vaginale e dell'esocervice con la spatola, come da figura e stratificarli separatamente sul vetrino portacampione, secondo le direttive di laboratorio.  
Depositare il materiale prelevato su un vetrino premendo delicatamente la spatola sul vetrino.  
Fissare immediatamente con uno spray fissatore citologico e poi gettare il dispositivo.



#### AVVERTENZE

**Il dispositivo deve essere utilizzato solo da medici o personale specializzato.**

Non utilizzare su pazienti in gravidanza.

Non usare per prelievo endometriale.

Il prodotto è monouso. Non riutilizzare.